

MULTI HOLDER マルチホルダー (点滴台装着型)



背面部ネジ固定具
・点滴台等に固定



結束バンド:ブルー
・積載物をマジックテープ固定
・取替可能

滑り止めストッパー付き
・積載物のズレを防止

- ・術後患者の廃液バッグ等の固定に最適
- ・点滴台や車椅子の支柱に取り付け
- ・移動時の煩わしを軽減

<使用目的>

ドレーンバッグ等を点滴台(ガートル台/医療用ベッドのパイプ部)に固定するために使用します。

<取り扱い方法>

- ①ガートル台と本製品とを、本製品の背面部にある取り付け器具でしっかりと固定してください。
- ②ドレーンバッグ等の積載物を本製品のホルダー一部の底に載せてください。
- ③結束バンドにて積載物を固定してください。
- ④積載物(最大積載量4,000g)の大きさに合わせて結束バンドを調節し、しっかりと固定してください。

<取り扱い上の注意>

- ・本製品の使用目的以外には使用しないこと。
- ・最大積載量を超える重さのものを載せないこと。
- ・積載物の形状等、場合によっては装着できないものもあります。
- ・ガートル台等に本製品を固定する際は、背面部の取り付け器具とパイプ部をしっかりと固定すること。
(固定が不十分な場合、本製品が落下、脱落する可能性があります。)
- ・本製品単体での自立性はありませんので、床などに直接置かないでください。
(ドレーンバッグ等が転倒する危険性があります。)

<製品仕様> ~材質~

樹脂部:透明硬質塩化ビニル

金属部:鉄(表面処理;ユニクロ及びクロメート)

結束バンド部:面ファスナー;ポリエステル

樹脂カン;ポリアセタール

伸縮部;ウーリーナイロン、レーヨン、ゴムラツテクス40番

滑り止め:ポリウレタン

外形寸法:縦320mm×横280mm×奥行き(最大)160mm

重量:750g

最大積載量:4,000g

<仕様>

- ・マルチホルダー本体 MDH-1000
- ・結束バンド(カラー:ブルー)取替用

* 本製品は予告なく変更する場合があります。

(発売元)

株式会社京都医療設計

ジャパンメディカル事業部

京都市山科区四宮神田町4

TEL:075-582-9580 FAX:075-582-9581

(製造元)

株式会社仲久

